

Tischautoklav

HMT 260MB

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
Merkmale



1. **Innovativ und vielseitig** mit kompaktem, elegantem Design, hoher Zuverlässigkeit und Sicherheit, intelligente Programmeinstellungen mit Vor- bzw. Trockenvakuum.
2. **10 -Installierte Programme**
 - 5 Sterilisierprogramme
 - 1 frei wählbares Programm
 - 3 Testprogramme
 - Trockenprogramm
3. **Vor-Vakuum:** Für ein sicheres Sterilisations-Ergebnis.
4. **Trocknungs-Vakuum:** Funktion: um ein perfekt getrocknetes Ergebnis zu erhalten.
5. **Mikroprozessor-Kontrolle-System:** Völlig automatische Kontrolle von Vorvakuum bis hin zum Trocknungsvakuum, 10 Programme für Ihre professionelle Auswahl.
6. **Automatische Wassereinspeisung(aus Tank):** in die Kammer nach der Vorvakuumphase.
7. **Doppelte Wassermangelsicherung:** Eine für den Wasser-Tank, eine für das Kammer-Wasser. Bei Unterschreiten des benötigten Wasserstandes leuchtet die „LOW-WATER“-Anzeige auf und ein akustisches Signal ertönt.
8. **Türverriegelung:** Druckkontrolle, außerdem kann, wenn die Tür nicht komplett geschlossen ist, keine Funktion ausgeführt werden.
9. **Zykluskontrolle:** Autocheck jeder einzelnen Arbeitsphase. Nach korrekter Beendigung des jeweiligen Zyklus leuchtet die „COMPLETE“-Anzeige.
10. **Vorheizung:** Mit Hilfe der eingebauten Heizung wird nicht nur die Kammer temperiert, sie wird auch zur Trocknung eingesetzt.
11. **Temperatur Kontrolle:** Temperaturkontrolle während der Sterilisation und Überhitzungsschutz
12. **Kammerdruck Überwachung:** über Sicherheitsventil und Druckschalter
13. **Not-Aus Schalter:** Drücken Sie den „EMERGENCY“-Schalter - es wird sofort die Stromzufuhr unterbrochen und die Kammer entlüftet.
14. **Flüssigkeitsprogramm:** Dies ist eine besondere Funktion für den Laborbedarf
15. **Besonderes PRIONEN Programm**
16. **BOWIE-DICK Test:** Die Benutzer können die korrekte Sterilisation mit dieser Einrichtung überwachen
17. **Fehler-Anzeige:** zur schnellen Fehlersuche für Service- und Bedienpersonal.

Technische Daten		HMT 260 MB
Kammervolumen	Liter	24
Kammermaße Ø x H	mm	260 x 450
Max. Sterilgutlänge	mm	350
Max. Sterilgut unverpackt, Feststoff	kg	5
Max. Sterilgut verpackt	kg	1,5
Außenmaße B x T x H	mm	553 x 665 x 440
Arbeitstemperatur	°C	105-135°
Vakuum		ja
Dokumentation		Ja, Einbaudrucker, SD-Karten Recorder
Wassertank	Liter	4,2
Heizleistung	kW	2,7
Gewicht	kg	59
Kennzeichnung		CE
Spannungsversorgung	V	AC 220 V/240 V
Sicherheitsvorrichtungen		Übertemperaturschutz, Sicherheitsventil, Überdruckschalter, Verschluss, Wasserstandsüberwachung für Vorratsbehälter und Sterilisierkammer
Programme		
6 Sterilisierprogramme		Unverpackt 121°C; Unverpackt 134°C Verpackt 121°C; Verpackt 134°C Prionenprogramm Frei einstellbar 105-135°C
3 Testprogramme		Dichtigkeitstest Helix-test Bowie-Dick tEst
Trockenprogramm	min	1-60
Andere Funktionen		Not-Aus Sterilprozessdokumentation Automatische Wassereinspeisung Echtzeitdrucker Zyklusähler Wartungszyklus erinnerung Kalibrier-/Servicemodus
Drucker		Thermopapierdrucker
SD-Karten Speicher		SD/HC max. 32GB
Artikelnummer		22014





Kellerstr. 1
D-84577 Tüssling
Tel.:++49(0)8633/50 520-0
Fax:++49(0)8633/50 520-99
info@hmc-europe.com
www.hmc-europe.com



HMT Technical Data

Chamber volume Litres

Chamber dimensions \varnothing x H mm

Exterior dimensions

W x D x H mm

Heating power kW

Weight kg

Vacuum

Water tank Litres 4,2

Operating temperature °C 121° or 135°

Markings CE

Power supply V AC 220 V/240 V

Safety Overheating protection, safety valve, overpressure switch
systems water level monitoring of the reservoir and sterilization ch

Item Number

22003